


## Produktdatenblatt

<b>Artikelbezeichnung</b>	miro-hydrocool	<b><i>elastische Kühlbandage</i></b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Einfaches, faltenfreies Anlegen der Binde in einem Zug, dadurch entfällt zeitaufwendiges Schneiden der einzelnen Lagen. Leicht modellierbares, längselastisches Material, sicherer Sitz - verrutscht nicht. Während des Trockenvorgangs (2 bis 4 Stunden) kühlt die Bandage aufgrund des hohen Wasseranteils. Beschleunigte Heilung durch das enthaltene Hydrokolloid/Alginat, gute Hautverträglichkeit. Eine gleich bleibende Viskosität der Binde kann bis zu einer Temperatur von 45°C gewährleistet werden.</p> <p><b>Anwendungsgebiete:</b> als halbstarrer Stütz- und Entlastungsverband bei Verstauchungen, Verrenkungen, Zerrungen, Prellungen, Sehnenscheidenentzündungen und zum Abbau posttraumatischer Ödeme im Bereich der Gelenke. Kann auch auf leichte offene Wunden direkt appliziert werden, ebenso wie bei Verbrennungen ersten Grades.</p>	
		

### Abmessungen

Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	VE
45056	6cm x 5m	0391578	84,90	10 Stück
45076	6cm x 7m	0391561	102,90	10 Stück
45058	8cm x 5m	0393560	104,90	10 Stück

### Materialzusammensetzung

Trägermaterial: 100% Baumwolle  
Kühlgel: Hydrokolloidmatrix mit eingelagertem Alginat

### Lagerungshinweise

- Anwendung der Bandage kann bei Zimmertempertaur erfolgen. Vorkühlung der Bandage im Kühlschrankschrank verstärkt den Kühleffekt.
- Bandage kann unbeeinträchtigt in einem Temperaturbereich von -20°C bis + 45°C gelagert und transportiert werden!
- Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

<b>Dehnung ca. (in %)</b>	<b>Sterilisation</b>	<b>waschbar bis</b>	<b>CE (auf Einzelprodukt)</b>	<b>Zoll-Tarif-N°</b>
55%	entfällt	entfällt	ja	3005 9055
<b>Haltbarkeit</b>	<b>Klassifizierung</b>	<b>nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)</b>		<b>Regel</b>
2 Jahre	I	I und VII		---