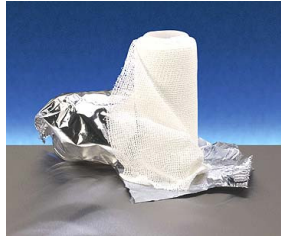


Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung	miro-zinkleimbinde	elastische Zinkleimbinde
Beschreibung	<p>Einfaches, faltenfreies Anlegen der Binde in einem Zug, dadurch entfällt zeitaufwendiges Schneiden der einzelnen Lagen. Leicht modellierbares, plastisches Material, sicherer Sitz - verrutscht nicht. Geeignet bei gezielten Kompressionen. Anzuwenden als leicht stützender, halbstarrer Dauer-Kompressionsverband bei:</p> <p>z.B.: Ödemen, Distorsionen des oberen Sprunggelenkes, bei unkomplizierten, belastungsstabilen Frakturen, Muskelzerrung, Muskelfaserrisse, Nachbehandlung nach Behandlung mit starren Verbänden (Frakturen oder Luxationen), chronisch venöser Insuffizienz, Tendopathien, Tendovaginitis uvm.</p> <p style="text-align: right;">Universalbreite: 10cm</p>	
		

Abmessungen

Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	VE
10805	10cm x 5m	0216088	63,00	10 Stück
10807	10cm x 7m	0216094	76,00	10 Stück
10810	10cm x 10m	0215775	99,90	10 Stück

Besonderheiten

- andere Breiten auf Anfrage

Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	elastische Mullbindengewebe (entspricht DIN 61634)	69% Viscose 31% Polyamid
Paste:	modifizierter Zinkleim	

Anlegetechnik

Zu verbindendes Körperteil mit einem Trikotschlauch abdecken (saugt Flüssigkeit der Binde auf) und genügend Trikotschlauch überlappen lassen, um nach der Wickelung den Rest wieder über die gesamte Wickelpartie hochzuziehen. Dies verhindert Verschmutzung mit evtl. Kleidungsstücken und sorgt für eine beschleunigte Trocknung. Einzelne Bindetouren dürfen nicht zu straff gewickelt werden, da sonst die Kanten der Binde Stauungen hervorrufen können. Nach jeder Bindetour kann die Binde „modelliert“ werden, d. h. den Zinkleim gleichmäßig verteilen.

Lagerungshinweise (äußerst wichtig)

Nicht bei Temperaturen über 25°C und/oder unter 15°C lagern oder transportieren!
Trocken lagern.

Dehnung ca. (in %)	Sterilisation	waschbar bis	CE (auf Einzelprodukt)	Zoll-Tarif-N°
80%	---	---	Ja	3005 9055
Haltbarkeit	Klassifizierung	nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)		Regel
5 Jahre	I	I und VII		---