


## Produktdatenblatt

<b>Artikelbezeichnung</b>	miro-castlonguette	<b>Orthopädisches Schienensystem</b>
<b>Beschreibung</b>	 <p>miro-castlonguette ist ein orthopädisches Schienensystem, welches zur teilweisen oder kompletten Ruhigstellung verwendet wird. Anwendungsgebiete sind frische Frakturen, Sehnenverletzungen, Distorsionen, Kapsel- oder Bandverletzungen. Das Schienensystem kann auch zum Stützen von Bindegewebs- oder Weichteilverletzungen eingesetzt werden.</p> <p>Es besteht aus einem mehrschichtigen Fiberglassystem, welches mit einem Polyurethanharz beschichtet ist, das bei Kontakt mit Wasser aktiviert wird. Das Fiberglassystem wird umhüllt von einem Polstergewebe, welches den Verband polstert und somit einen hohen Tragekomfort für den Patienten erzeugt (Polster kann seitlich geöffnet werden).</p> <p>Die benötigte Länge des Verbandes wird direkt von der Rolle abgeschnitten, wodurch kosteneffektiv gearbeitet werden kann. Der Verband ist atmungsaktiv, was einen Luft- und Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet.</p>	

### Abmessungen

Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	PE
13300	5,0cm x 4,5m	6706238	119,95	1 Rolle
13301	7,5cm x 4,5m	6068111	133,95	1 Rolle
13302	10,0cm x 4,5m	6068105	158,95	1 Rolle
13303	12,5cm x 4,5m	6068097	194,95	1 Rolle

### Materialzusammensetzung und Eigenschaften

<b>Deckmaterial:</b>	Non-Woven aus Polyethylen-Elasthanfasern
<b>Mittelschicht:</b>	8-lagiges Fiberglas mit Polyurethanharz imprägniert
<b>Polstermaterial:</b>	Non-Woven aus Polypropylen

- Luftdurchlässig
- Im ausgehärteten Zustand wasserresistent
- Stabil und bruchstabil
- Röntgentransparent

### Technische Daten

- Tauchwassertemperatur: 20 °C - 25 °C
- Offene Zeit: ca. 3-4 Min. formbar
- Belastbarkeit: nach etwa 20 Min.
- Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum
- Haltbarkeit bei Anwendung: bis zu 60 Tagen

<b>Dehnung ca. (in %)</b>	<b>Sterilisation</b>	<b>waschbar bis</b>	<b>CE (auf Einzelprodukt)</b>	<b>Zoll-Tarif-N°</b>
---	---	---	Ja	9021 1090
<b>Haltbarkeit</b>	<b>Klassifizierung</b>	<b>nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)</b>		<b>Regel</b>
3 Jahre	I	I und VII		---