





## Produktdatenblatt

<b>Artikelbezeichnung</b>	miro-absofoam	<b>Schaumverband</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>miro-absofoam ist ein steriler, semipermeabler, nicht-klebender Wundverband mit hohem Absorptionsvermögen. Anwendung zur Exsudataufnahme und Aufrechterhaltung eines ideal-feuchten Wundmilieus. miro-absofoam ist durchlässig für Gase, aber nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Wundexsudat wird in der stark absorbierenden Schaumstoffschicht aufgenommen und dort zurück gehalten. Er hinterlässt keine Rückstände in der Wunde. Die Schaumstoffschicht begünstigt eine hohe Verdunstungsrate und polstert gleichzeitig die Wunde ab. Der Verband verklebt nicht mit der Wunde und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel. Der Verband muss mit einem geeigneten Sekundärverband fixiert werden. Zuschnitte können unter sterilen Aspekten erfolgen.</p> <p><b>ANWENDUNGSGEBIETE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• akute und chronische Wunden mit Exsudatbildung</li> <li>• Dekubitus in allen Stadien</li> <li>• Ulcera verschiedenen Ursprungs</li> <li>• Diabetisches Fußsyndrom</li> <li>• Verbrennungen bis Grad 2a</li> </ul>	
		
		

<b>Wundstadium</b>	<b>Exsudation</b>	<b>zu verwenden als</b>
		Primärverband Sekundärverband

### Abmessungen


Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	PE
24003	ca. 10 x 10cm	0203683	56,90	10 Stück

### Materialzusammensetzung

1. offenporiger Polyurethanschaum mit Polsterwirkung, absorbiert Wundexsudat
2. Eine für Gase durchlässige, aber für Flüssigkeiten und Bakterien undurchlässige äußere Polyurethanschicht

### Spezielle Lagervorschriften

**Lagerung:** Bei Raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) kühl und trocken lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „First in - first out“.

■ nekrotische Wunde    ■ gelblich belegte (fibrinös) Wunde    ■ granulierende Wunde    ■ epithelisierende Wunde  
 schwache Exsudation    mittlere Exsudation    starke Exsudation

<b>Dehnung ca. (in %)</b>	<b>Sterilisation</b>	<b>waschbar bis</b>	<b>CE (auf Einzelprodukt)</b>	<b>Zoll-Tarif-N°</b>
entfällt	Ethylenoxid	entfällt	CE 0297	30059031
<b>Haltbarkeit</b>	<b>Klassifizierung</b>	<b>nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)</b>		<b>Regel</b>
5 Jahre	I/s	V		4