
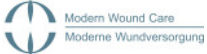




Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung	miro-aquapad	Hydrogelverband
Beschreibung	<p>miro-aquapad ist ein steriler, semipermeabler, transparenter Hydrogelverband aus einem saugfähigen Polyurethan-Gel. Das Gel kann sowohl Feuchtigkeit abgeben, als auch Wundexsudat aufnehmen. Nekrosen und Gewebetrümmer werden vom Gel gelöst und aufgenommen. miro-aquapad erhält ein ideal-feuchtes Wundmilieu, welches den natürlichen Wundheilungsprozess fördert.</p> <p>Anwendung bei nekrotischen, trockenen sowie schwach exsudierenden Wunden. Aufgrund der äußeren Polyurethanschicht ist miro-aquapad durchlässig für Gase aber nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Der Hydrogelverband wirkt durch den subjektiv kühlenden Effekt schmerzlindernd. miro-aquapad verklebt nicht mit der Wunde und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel. Der Verband muss mit einem geeigneten Sekundärverband fixiert werden. Zuschnitte können unter sterilen Aspekten erfolgen</p> <p>ANWENDUNGSGEBIETE</p> <ul style="list-style-type: none"> • oberflächliche Wunden • Verbrennungen bis Grad 2a • Nekrotische, schwach exsudierende und trockene Wunden verschiedenen Ursprungs 	
		
		

Wundstadium	Exsudation	zu verwenden als
		Primärverband Sekundärverband

Abmessungen

Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	PE
24010	ca. 10 x 10cm	0203631	65,90	10 Stück




Materialzusammensetzung

1. Polyurethan-Gel mit ca. 60% Wasseranteil
2. Eine für Gase durchlässige, aber für Flüssigkeiten und Bakterien undurchlässige äußere Polyurethanschicht

Spezielle Lagervorschriften

Lagerung: Bei Raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) kühl und trocken lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „First in - first out“.

■ nekrotische Wunde ■ gelblich belegte (fibrinös) Wunde ■ granulierende Wunde ■ epithelisierende Wunde

 schwache Exsudation  mittlere Exsudation  starke Exsudation

Dehnung ca. (in %)	Sterilisation	waschbar bis	CE (auf Einzelprodukt)	Zoll-Tarif-N°
entfällt	Ethylenoxid	entfällt	CE 0297	3005.1000
Haltbarkeit	Klassifizierung	nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)		Regel
3 Jahre	II/b	II		4